


안전손잡이

Safety Grab Bars ASH-201

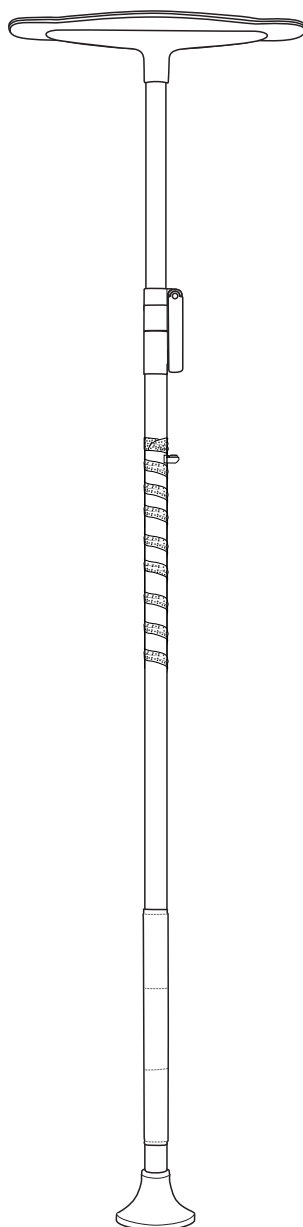

사용설명서



안전동작하중
80kg 이하

이 사용설명서를 반드시 읽은 후 사용하시고, 다 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

- 사용전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오 !
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
구입일, 판매점 등을 기입하고 확인 해 주십시오.

안전을 위한 주의사항

반드시 지켜 주십시오!

사용자 및 그 외의 사람에게 상해, 재산상의 피해를 사전에 방지하기 위해 안전에 관련된 중요한 사항들을 기재하고 있으니 반드시 지켜 주십시오.

그림기호의 의미는 아래와 같습니다.



이 그림기호는 반드시 지켜야 할 강제사항을 의미합니다.



경고 표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망 및 피해가 발생할 가능성이 있는 경우.



이 그림기호는 해서는 안되는 금지를 의미합니다.



주의 표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상 및 피해가 발생할 가능성이 있는 경우.

⚠ 경고



사용목적외 사용금지

안전손잡이 이외의 용도로 사용하지 마십시오. 제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.



안전손잡이 바닥부분에 물 등 수분이 닿게 하지 마십시오.

미끄러짐에 의한 안전손잡이의 전도 등으로 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



안전손잡이를 상방향으로 들어 올리거나 상방향의 힘이 가해지도록 하지 마십시오.

전도 등으로 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



안전손잡이를 심하게 밀거나 당기는 등 과격한 충격을 가하거나 무리하게 체중을 가하지 마십시오.

전도 등으로 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



임의로 분해, 개조, 수리하지 마십시오.

제품기능이 정상적으로 작동되지 않아 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전열기 등 화기류를 가까이 하지 마십시오.

제품손상 및 왜곡으로 사용 중 상해를 입을 수 있습니다.



사용자의 손이 젖어있거나 미끄러운 상태에서 사용하지 마십시오.

손잡이를 놓치거나 미끄러짐 등으로 상해를 입을 수 있습니다.



원형손잡이를 사용 할 경우 손, 발 등을 원형손잡이 사이에 넣지 마십시오

손, 발이 끼어서 꺾이거나 하여 심각한 사고를 당할 수 있습니다.



천정이 평평하지 않거나 불안정한 곳에는 사용하지 마십시오.

전도 등으로 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



일상점검을 하십시오 .




불안정한 상태에서 사용 시 전도 등으로 상해를 입을 수 있습니다.



바닥면이 평평하고 안정된 곳에서 사용 하십시오.

불안정한 바닥면에서 사용 할 경우 전도 등으로 상해를 입을 수 있습니다.


⚠ 주의

- 
 안전손잡이에 매달리거나 기대는 등 지지목적으로 사용하지 마십시오.
전도 등으로 상해를 입을 수 있습니다.
- 
 제품세척 및 소독을 위하여 염소계 및 신나, 크레졸 등과 산, 알칼리계 세제 등을 사용하지 마십시오.
제품열화, 변형 및 파손의 원인이 되고 이로 인해 상해를 입을 수 있습니다.
- 
 제품 세척 시 중성세제를 사용하십시오.
청결 및 제품보호, 미끄럼방지 등을 위하여 중성세제를 사용하여 세척 하십시오.

사용목적

거동이 불편한 고령자 및 거동이 불편한 사람이 실내 공간에서 사용 시 몸을 지지하거나 지탱하기 위해 사용하는 손잡이.

일상점검 점검 시 이상이 발견되면 즉각 조치를 취하고 확인 후 사용하십시오.

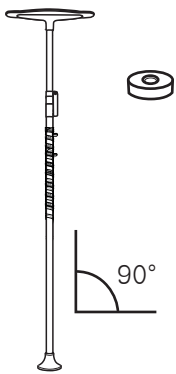


O




X

수평계를 이용하여 수직으로 세워져 있는지 반드시 확인하십시오.

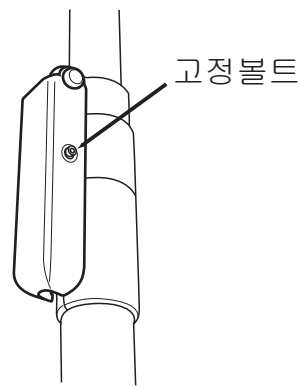


O

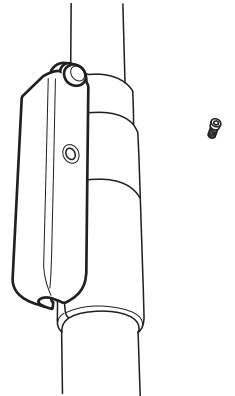

X


잠금레버의 고정볼트가 확실하게 체결되어 있는지 반드시 확인하십시오.

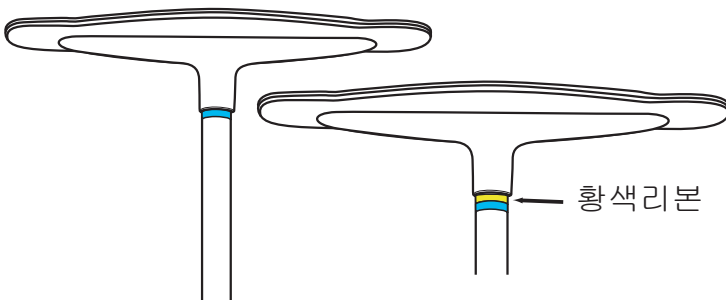


O

X

황색리본이 보이는지 확인하십시오.
황색리본이 보이면 불안정한 설치상태입니다.

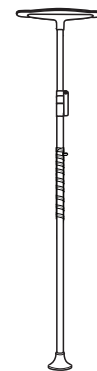

O

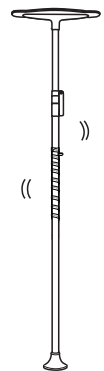

X


손잡이를 잡고 흔들었을 때 심한 흔들림이 없는지 확인하십시오.

설치방법 _ 설치 전

설치 전에 설치가 가능 여부를 확인하여 주십시오.


[천정상태 확인]

- ❌ 천정의 표면상태가 들뜨거나 심하게 열화 된 경우 설치하지 마십시오.
천정부착부가 미끄러져 이탈되어 전도로 인한 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- ❌ 천정이 들리거나 울렁거려 강도가 약한 경우 설치하지 마십시오.
천정부착부가 이탈되어 전도로 인한 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- ❌ 천정이 경사진 상태의 경우 설치하지 마십시오.
천정부착부가 미끄러져 이탈되어 전도로 인한 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- ❌ 천정에 에어컨 주변이나 천정표면에 습기가 차는 경우 설치하지 마십시오.
천정부착부가 미끄러져 이탈되어 전도로 인한 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

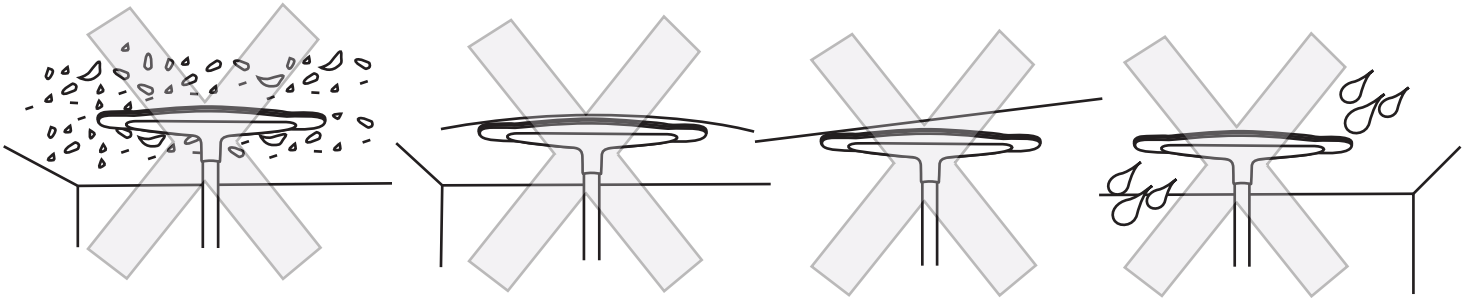


[바닥상태 확인]

- ❌ 바닥의 표면상태가 들뜨거나 평평하지 않은 경우 설치하지 마십시오.
바닥부착부가 미끄러져 이탈되어 전도로 인한 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- ❌ 매트나 러그 위에는 설치하지 마십시오.
바닥부착부가 미끄러져 이탈되어 전도로 인한 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- ❌ 바닥이 경사진 상태의 경우 설치하지 마십시오.
바닥부착부가 미끄러져 이탈되어 전도로 인한 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- ❌ 싱크대 및 수도꼭지 주변이나 바닥표면에 습기가 차는 경우 설치하지 마십시오.
바닥부착부가 미끄러져 이탈되어 전도로 인한 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

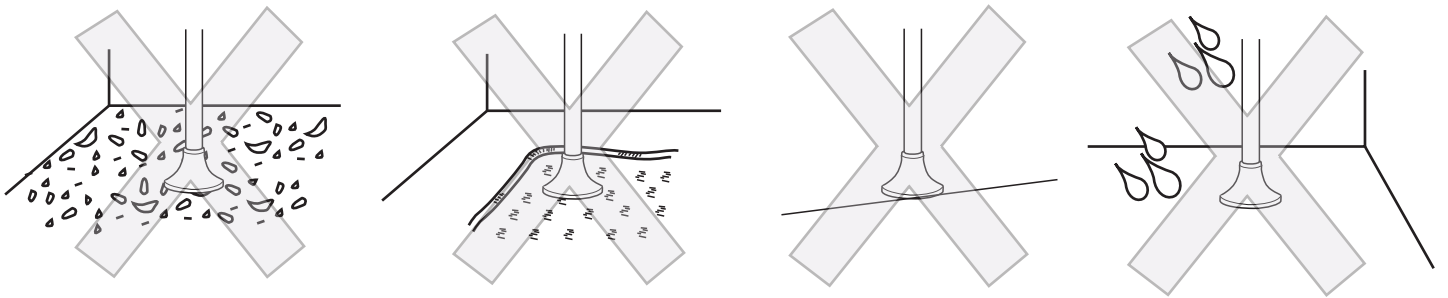

[설치간격 확인]


- ❗ 손잡이와 침대 및 벽 등과의 간격을 확인하십시오.
손잡이와 주변부의 간격이 사용자의 이동에 충분한 간격으로 확보되지 않을 경우 사용자의 전도에 의한 끼임 등으로 상해를 입을 수 있습니다.

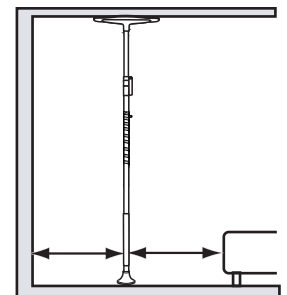

설치방법 _ 설치순서

설치순서에 따라 설치하여 주십시오.

1. 4쪽의 설치 전 확인사항에 따라 사용환경을 점검하고 적절한 설치위치를 설정하십시오.
2. 설치 할 곳의 천정 및 바닥의 부착면을 깨끗이 쓸고 닦아 주십시오.
3. 제품을 개봉하여 구성품을 확인하여 주십시오.(8쪽 참조)
4. 천정플레이트를 조립하여 주십시오.

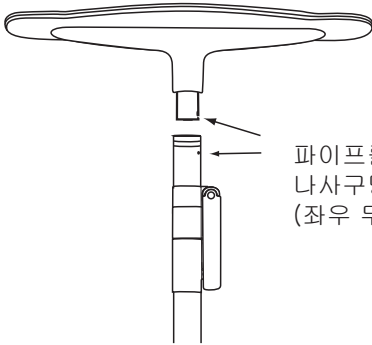


파이프를 결합하여 나사구멍을 맞춰주세요. (좌우 두개)


고정볼트 2개 (M4렌치볼트)

육각렌치로 확실히 고정해 주세요. (3mm 육각렌치)

5. 안전손잡이를 설치 할 곳에 바닥면 및 천정과 수직이 되도록 세워주십시오.

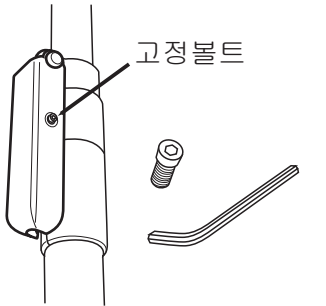

잠금레버의 고정볼트를 풀어서 잠금레버의 잠금 기능을 해제하십시오. (3mm렌치사용)

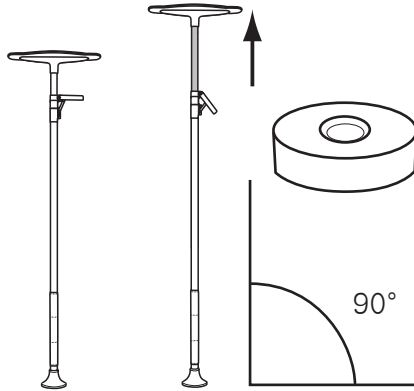


잠금레버를 올린상태에서 상부 파이프를 잡고 천정에 닿게 하여 올려주십시오.


잠금레버를 절반정도 내려서 반잠금 상태로 하면 상부파이프의 상하강이 정지됩니다.

수평계 등을 이용하여 손잡이의 지면과의 직각상태를 확인하고 조정하십시오.


6. 잠금레버를 내려서 손잡이를 설치하고 잠금레버의 고정볼트를 조여서 레버를 잠금상태로 하십시오.

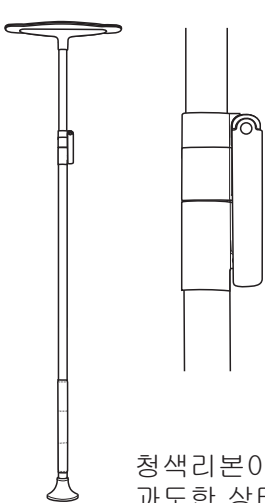

청색리본이 보이지 않고 감춰지는 경우는 설치강도가 과도한 상태입니다. 설치순서에 따라 재설치하여 주십시오.

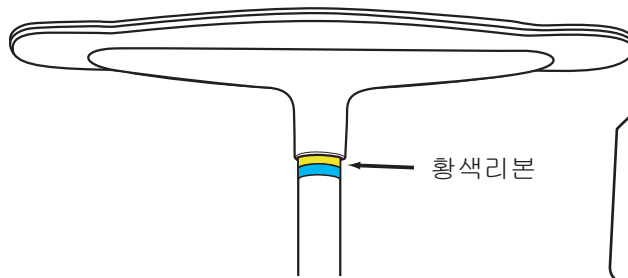

잠금레버를 내려서 설치를 하였을 때 천정플레이트 하단의 파이프에 황색리본이 보이면 요구설치강도에 부족한 상태입니다. 설치순서에 따라 재설치하여 주십시오.

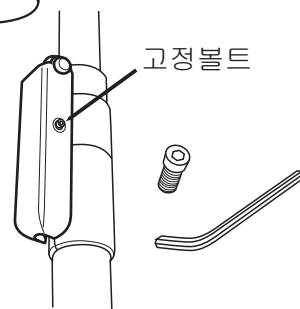


잠금레버의 고정볼트를 조여서 잠금레버를 잠금 상태로 하십시오. (3mm렌치사용)



설치가 가능범위는 높이 2m10cm~2m90cm입니다. 설치가능범위를 초과하여 설치하지 마십시오.

7. 설치가 완료되면 설치점검표에 따라 점검사항을 확인하십시오.

제품의 특징 및 사용방법

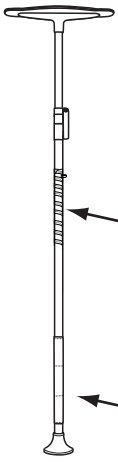


당사의 안전손잡이는 거동이 불편하신 분이 생활공간에서 일상생활의 필요한 동작을 행할 때 보다 용이하도록 동작을 지원함으로써 활동량을 증대하고 활력증진에 기여하여 자립지원을 목적으로 하며, 또한 전도 등에 의한 사고예방을 목적으로 합니다.

미끄럼방지그립은 사용자가 손잡이를 잡고 사용할 때 미끄러짐으로 인하여 발생 할 수 있는 사고를 방지하기 위한 것입니다.
사용자의 신장에 맞추어 설치사용을 권장합니다.

손잡이커버는 무릎 또는 발이 손잡이파이프에 부딪칠 경우를 대비한 것입니다.
손잡이 하단부 설치사용을 권장합니다.

제품규격

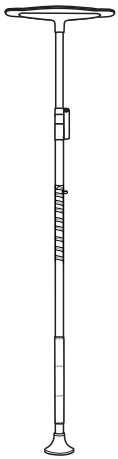

제품사이즈

2,080mm(높이)X600mm(천정플레이트 폭)/160mm(바닥플레이트 폭)

제품중량 : 6.2Kg

주요재질 : 알루미늄

설치가능범위(높이) : 2m10cm~2m90cm

안전동작하중 : 80Kg

제품구성



- ① 본체 1세트
- ② 천정플레이트 1세트
- ③ 고정볼트(M4렌치볼트) 2개
- ④ 육각렌치 3mm 1개
- ⑤ 설명서 1권

