

안전손잡이

Safety Grab Bars

사용설명서


ASH-201



- 품명 : 거치식 안전손잡이
- 모델명 : ASH-201
- 제조년월 : 제품에 표기
- 제조자명 : (주)에이엠이
- A/S전화번호 : 031-677-7522
- 제조국명 : 한국
- 사용장소 : 1) 실내용 욕실, 화장실, 부엌 등
수분이 있는 환경에서는 녹이
발생될 수 있음
2) 사용 장소 제한 없음
- 단체표준번호 : KSPA 5001
- 인증번호 : 제350호(20150327-1)

[품질보증] 본 제품은 단체표준인증 단체인 당 협회에서 품질을 보증함

한국고령친화용품산업협회

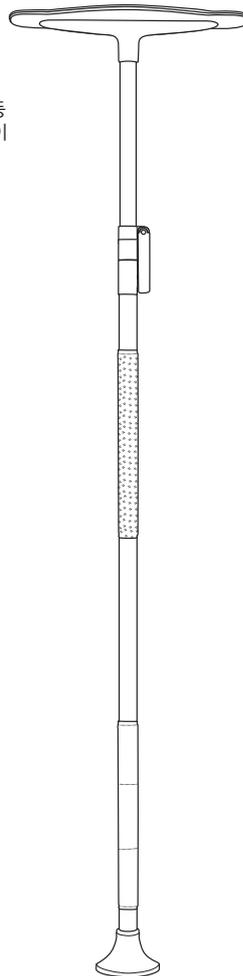

최대사용자체중
80Kg

이 사용설명서를 반드시 읽은 후 사용하시고, 다 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

- 사용전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다. 구입일, 판매점 등을 기입하고 확인 해 주십시오.

안전을 위한 주의사항

반드시 지켜 주십시오!

사용자 및 그 외의 사람에게 상해, 재산상의 피해를 사전에 방지하기 위해 안전에 관련된 중요한 사항들을 기재하고 있으니 반드시 지켜 주십시오.

*그림기호의 의미는 아래와 같습니다.



이 그림기호는 반드시 지켜야 할 강제사항을 의미합니다.



경고 표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망 및 피해가 발생할 가능성이 있는 경우



이 그림기호는 해서는 안되는 금지를 의미합니다.



주의 표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상 및 피해가 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 경고



사용목적 외 사용금지

안전손잡이 이외의 용도로 사용하지 마십시오. 제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.



안전손잡이 바닥 부분에 물 등 수분이 닿게 하지 마십시오.

미끄러짐에 의한 안전손잡이의 전도 등으로 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



안전손잡이를 상방향으로 들어 올리거나 상방향의 힘이 가해지도록 하지 마십시오.

전도 등으로 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



안전손잡이를 심하게 밀거나 당기는 등 과격한 충격을 가하거나 무리하게 체중을 가하지 마십시오.

전도 등으로 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



임의로 분해, 개조, 수리하지 마십시오.

제품기능이 정상적으로 작동되지 않아 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전열기 등 화기류를 가까이 하지 마십시오.

제품손상 및 왜곡으로 사용 중 상해를 입을 수 있습니다.



사용자의 손이 젖어있거나 미끄러운 상태에서 사용하지 마십시오.

손잡이를 놓치거나 미끄러짐 등으로 상해를 입을 수 있습니다.



원형손잡이를 사용 할 경우 손, 발 등을 원형손잡이 사이에 넣지 마십시오.

손, 발이 끼어서 꺾이거나 하여 심각한 사고를 당할 수 있습니다.



천정이 평평하지 않거나 불안정한 곳에는 사용하지 마십시오.

전도 등으로 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



일상점검을 하십시오.

불안정한 상태에서 사용 시 전도 등으로 상해를 입을 수 있습니다.



바닥면이 평평하고 안정된 곳에서 사용 하십시오.

불안정한 바닥면에서 사용 할 경우 전도 등으로 상해를 입을 수 있습니다.

⚠ 주의


- 
안전손잡이에 매달리거나 기대는 등 지지 목적으로 사용하지 마십시오.
 전도 등으로 상해를 입을 수 있습니다.
- 
제품세척 및 소독을 위하여 염소계 및 신나, 크레졸 등과 산, 알칼리계 세제 등을 사용하지 마십시오.
 제품열화, 변형 및 파손의 원인이 되고 이로 인해 상해를 입을 수 있습니다.
- 
제품 세척 시 중성세제를 사용하십시오.
 청결 및 제품보호, 미끄럼방지 등을 위하여 중성세제를 사용하여 세척 하십시오.

사용목적


거동이 불편한 고령자 및 거동이 불편한 사람이 실내 공간에서 사용 시 몸을 지지하거나 지탱하기 위해 사용하는 손잡이

일상점검



점검 시 이상이 발견되면 즉각 조치를 취하고 확인 후 사용하십시오.

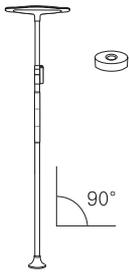


수평계를 이용하여 수직으로 세워져 있는지 반드시 확인하십시오.

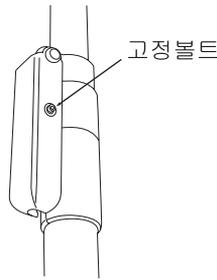

잠금레버의 고정볼트가 확실하게 체결되어 있는지 반드시 확인하십시오.

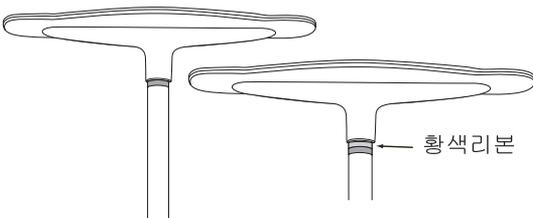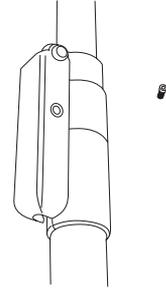

황색리본이 보이는지 확인하십시오.
 황색리본이 보이면 불안정한 설치상태입니다.

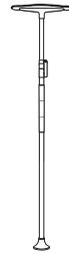

손잡이를 잡고 흔들었을 때 심한 흔들림이 없는지 확인하십시오.




설치방법 _ 설치전

설치 전에 설치가능 여부를 확인하여 주십시오.


[천정상태 확인]

- ⊘ 천정의 표면상태가 들뜨거나 심하게 열화 된 경우 설치하지 마십시오.
천정부착부가 미끄러져 이탈되어 전도로 인한 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- ⊘ 천정이 들리거나 울렁거리려 강도가 약한 경우 설치하지 마십시오.
천정부착부가 이탈되어 전도로 인한 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- ⊘ 천정이 경사진 상태의 경우 설치하지 마십시오.
천정부착부가 미끄러져 이탈되어 전도로 인한 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- ⊘ 천정에어른 주변이나 천정표면에 습기가 차는 경우 설치하지 마십시오.
천정부착부가 미끄러져 이탈되어 전도로 인한 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

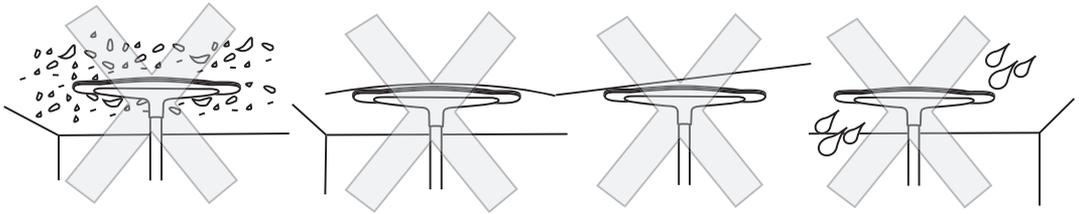


[바닥상태 확인]

- ⊘ 바닥의 표면상태가 들뜨거나 평평하지 않은 경우 설치하지 마십시오.
바닥부착부가 미끄러져 이탈되어 전도로 인한 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- ⊘ 매트나 러그 위에는 설치하지 마십시오.
바닥부착부가 이탈되어 전도로 인한 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- ⊘ 바닥이 경사진 상태의 경우 설치하지 마십시오.
바닥부착부가 미끄러져 이탈되어 전도로 인한 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- ⊘ 싱크대 및 수도꼭지 주변이나 바닥표면에 습기가 차는 경우 설치하지 마십시오.
바닥부착부가 미끄러져 이탈되어 전도로 인한 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

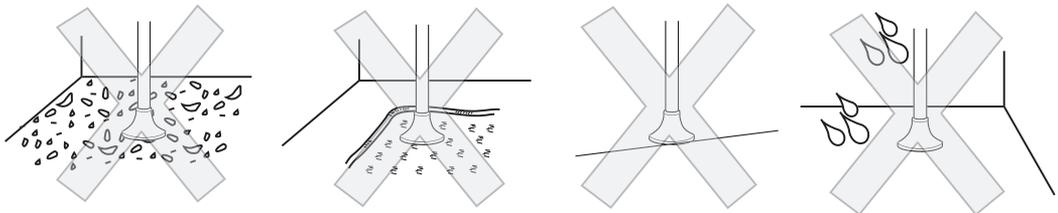

[바닥상태 확인]


- ❗ **손잡이와 침대 및 벽 등과의 간격을 확인하십시오.**
손잡이와 주변부의 간격이 사용자의 이동에 충분한 간격으로 확보되지 않을 경우 사용자의 전도에 의한 끼임 등으로 상해를 입을 수 있습니다.

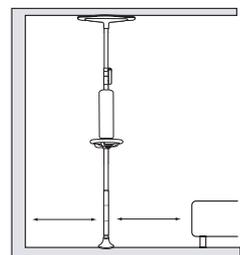


설치방법 _ 설치순서

설치 순서에 따라 설치하여 주십시오.

1. 4쪽의 설치 전 확인사항에 따라 사용환경을 점검하고 적절한 설치위치를 설정하십시오.
2. 설치 할 곳의 천정 및 바닥의 부착면을 깨끗이 쓸고 닦아 주십시오.
3. 제품을 개봉하여 구성품을 확인하여 주십시오.(8쪽 참조)
4. 천정플레이트를 조립하여 주십시오.

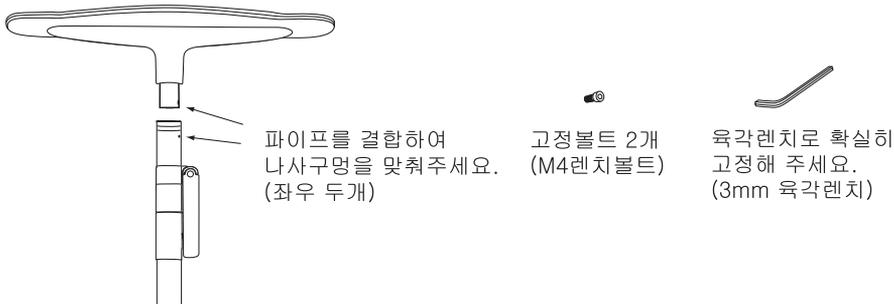

5. 안전손잡이를 설치 할 곳에 바닥면 및 천정과 수직이 되도록 세워주십시오.

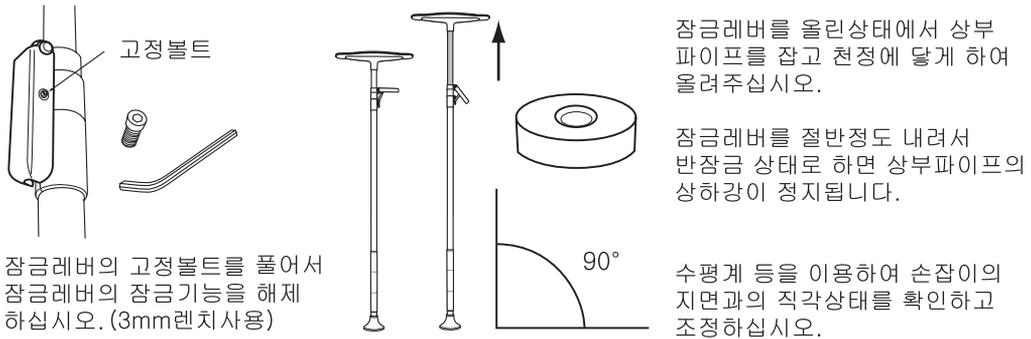


6. 잠금레버를 내려서 손잡이를 설치하고 잠금레버의 고정볼트를 조여서 레버를 잠금상태로 하십시오.



⊘ 설치가능범위는 높이 2m10cm~2m90cm입니다. 설치가능범위를 초과하여 설치하지 마십시오.

7. 설치가 완료되면 설치점검표에 따라 점검사항을 확인하십시오.

제품의 특징 및 사용방법

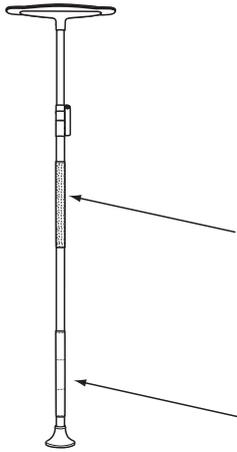

당사의 안전손잡이는 거동이 불편하신 분이 생활공간에서 일상 생활의 필요한 동작을 행할 때 보다 용이하도록 동작을 지원함으로써 활동량을 증대하고 활력증진에 기여하여 자립지원을 목적으로 하며, 또한 전도 등에 의한 사고 예방을 목적으로 합니다.

미끄럼방지커버는 사용자가 손잡이를 잡고 사용할 때 미끄러짐으로 인하여 발생 할 수 있는 사고를 방지하기 위한 것입니다. 사용자의 신장에 맞추어 설치사용을 권장합니다.

손잡이커버는 무릎 또는 발이 손잡이파이프에 부딪칠 경우를 대비한 것입니다. 손잡이 하단부 설치사용을 권장합니다.

제품규격



제품사이즈 : 2,080mm(높이)×600mm(천정플레이트 폭)
/160mm(바닥플레이트 폭)


제품중량 : 6.2Kg

주요재질 : 알루미늄

설치가능범위(높이) : 2m10cm~2m90cm

최대사용자체중 : 80Kg

제품구성

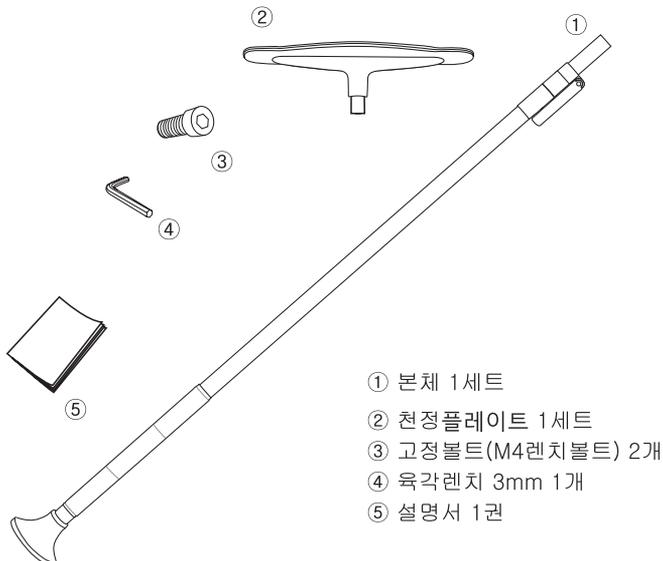

- ① 본체 1세트
- ② 천정플레이트 1세트
- ③ 고정볼트(M4렌치볼트) 2개
- ④ 육각렌치 3mm 1개
- ⑤ 설명서 1권

안전손잡이 점검표

(주)아시아엠이

고객명		전화번호	
설치주소			
모델명	로트(코드)번호		수량

판정	O : 적합 X : 부적합 √ : 해당없음	※부적합이 하나라도 있을 경우 반드시 재설치 또는 조치 후 사용하시고, 미해결의 경우 당사로 연락주십시오.
----	-------------------------------	---

No	점검내용	판정	처리내용
1	황색리본이 숨겨져 있을 것.		
2	수직으로 설치되어 있을 것.		
3	손잡이를 잡고 흔들었을 때 이상이 없을 것.		
4	잠금레버의 고정볼트는 단단히 조여져 있을 것.		
5	손잡이가 설치된 천정부에는 경사, 습기, 들뜸, 변형 등 결함은 없을 것.		
6	손잡이가 설치된 바닥부에는 경사, 습기, 들뜸, 변형 등 결함은 없을 것.		
7	손잡이가 매트나 러그 위에 설치되어 있지 않을 것.		
8	손잡이와 주변부의 간격이 사용자의 이동에 충분한 간격으로 확보되어 있을 것.		
9	손잡이의 각 체결부위는 확실히 체결되어 있을 것.		
10	사용자에게 사용상의 주의사항을 주지 시킬 것.		

종합판정 및 처리내용

설치일자 :

설치자 :

확인자 :

서명 또는 인

서명 또는 인

연락처 :

연락처 :

교환, 반품 및 A/S

- 당사 제품의 소비자분쟁해결기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거합니다.
- 당사 제품의 보증기간은 1년입니다.

소비자 피해유형		보상 내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장으로 중요한 수리를 요하는 경우		제품교환 또는 환불	해당 없음
구입 후 30일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장으로 중요한 수리를 요하는 경우		제품교환 또는 무상수리	해당 없음
수리 가능	동일 하자로 2회째 고장 발생 시	무료수리	유료수리
	동일 하자로 3회째 고장 발생 시	교환 또는 환불	유료수리
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	교환 또는 환불	유료수리
수리 불가	부품 보유기간 이내에 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	교환 또는 환불	정액 감가상각 후 교환
	부품 보유기간 이내에 수리용 부품이 없어서 수리 불가능 시	교환 또는 환불	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환불
소비자 과실	수리가 가능한 경우	유료수리	유료수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유료수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	해당 없음
천재지변에 의한 고장이 발생 하였을 경우		유료수리	유료수리
사용상 정상마모 되는 소모성 부품을 교환하는 경우			
기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부원인으로 인한 경우			

제품보증서

제품명 : _____ 모델명 : _____
 구입일 : _____ 년 _____ 월 _____ 일
 고객명 : _____ 전화번호 : _____
 판매점 : _____ 전화번호 : _____

- 수리 의뢰시 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 규정된 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상보증기간은 구입일로부터 산정되므로 판매점 등에서 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. 구입일자 미기재 및 확인이 곤란한 경우 제조년월일로부터 3개월이 경과한 날을 기준으로 품질 보증기간을 기산합니다.
- 당사 부품 보유기간은 6년입니다.

ame

(주)에이엠이 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 469 (우)17600
 고객상담실 031-677-7522