

사용설명서

BCI-102

이 사용설명서를 반드시 읽은 후 사용하시고,
다 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

안전을 위한 주의사항

반드시 지켜 주십시오!

사용자 및 그 외의 사람에게 상해, 재산상의 피해를 사전에 방지하기 위해 안전에 관련된 중요한 사항들을 기재하고 있으니 반드시 지켜 주십시오.

*그림기호의 의미는 아래와 같습니다.



이 그림기호는 반드시 지켜야 할 강제사항을 의미합니다.



경고 표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망 및 피해가 발생할 가능성이 있는 경우



이 그림기호는 해서는 안되는 금지를 의미합니다.



주의 표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품손상 및 피해가 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 경고



한번 사용한 채혈침은 반드시 채혈기에서 분리하여 폐기 하십시오.
채혈침을 재사용 할 경우 감염의 우려가 있습니다.



채혈기 헤드 등이 혈액에 의해 오염되었을 경우 반드시 소독 후 사용 하십시오.
오염된 제품 사용 시 감염의 우려가 있습니다.



사용 후 알콜 등으로 채혈기를 소독하십시오.
오염된 제품 사용 시 감염의 우려가 있습니다.



사용목적 이외의 용도로 사용하지 마십시오. 감염 및 상해를 입을 수 있습니다.



유아나 지각장애가 있는 사람은 사용하지 마십시오. 감염 및 상해를 입을 수 있습니다.

⚠ 주의



제품 본체를 분해하지 마십시오.
제품손상의 원인이 될 수 있습니다.




제품 본체는 중탕 소독하지 마십시오.
제품 내부의 변형 및 열화로 제품손상의 원인이 될 수 있습니다.

구성품



사용방법

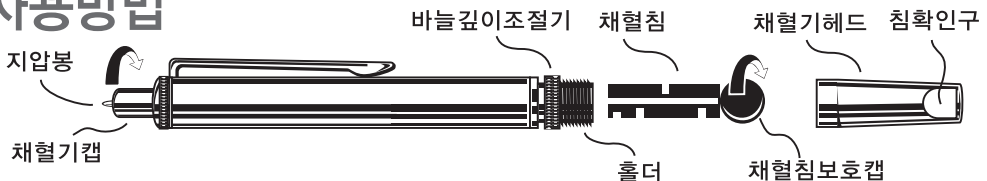

채혈기캡을 반시계 방향을 돌리면 지압봉이 감추어집니다.

채혈침을 홀더에 삽입하고 채혈침보호캡을 돌려서 탈피하면 채혈바늘이 나옵니다. 홀더에 채혈침 대신 타봉을 삽입하여 타봉기로 사용 할 수 있습니다.

채혈기헤드를 홀더에 삽입하기 전에 바늘깊이조절기를 돌려서 바늘깊이를 조절 할 수 있습니다.(시계방향 +)

채혈기헤드를 돌려서 완전히 잠고 채혈기캡을 돌려서 작동합니다. 침확인구를 통해 채혈침을 확인 할 수 있습니다.

*채혈침은 별매품

사용목적

인체에서 적은 양을
채혈하는 데에 사용하는 기구

보관방법

통풍이 잘되는 건조한 곳에 보관

교환, 반품 및 A/S

- 당사 제품의 소비자분쟁해결기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거합니다.
- 당사 제품의 보증기간은 1년입니다.

| 소비자 피해유형 | 보상 내용 | |
|---|--------------|---------|
| | 보증기간 이내 | 보증기간 이후 |
| 구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장으로 중요한 수리를 요하는 경우 | 제품교환 또는 환불 | 해당 없음 |
| 구입 후 30일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장으로 중요한 수리를 요하는 경우 | 제품교환 또는 무상수리 | 해당 없음 |
| 천재지변에 의한 고장이 발생 하였을 경우 | 유료수리 | 유료수리 |
| 사용상 정상마모 되는 소모성 부품을 교환하는 경우 | | |
| 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부원인으로 인한 경우 | | |


제품표시

제품명 : 채혈기
형명 : BCI-102
품목신고번호 : 경인 제선 07-226호
포장단위 : SET

* 본 제품은 의료기기입니다.

제품규격

Ø 10mm×128.7mm
Net Weight : 27g

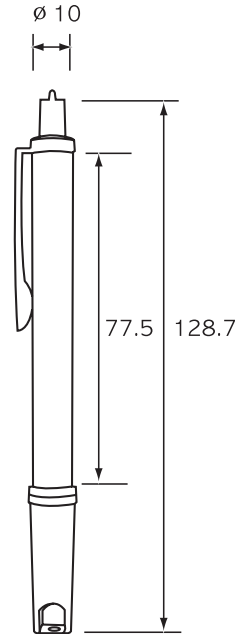

제품보증서

제품명 : _____ 모델명 : _____

구입일 : _____ 년 _____ 월 _____ 일

고객명 : _____ 전화번호 : _____

판매점 : _____ 전화번호 : _____

- 수리 의뢰시 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 규정된 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상보증기간은 구입일로부터 산정되므로 판매점 등에서 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. 구입일자 미기재 및 확인이 곤란한 경우 제조년월일로부터 3개월이 경과한 날을 기준으로 품질 보증기간을 기산합니다.
- 당사 부품 보유기간은 6년입니다.

ame

(주)에이엠이 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 469 (우)17600
고객상담실 031-677-7522

사용설명서

BCI-103

이 사용설명서를 반드시 읽은 후 사용하시고,
다 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

안전을 위한 주의사항

반드시 지켜 주십시오!

사용자 및 그 외의 사람에게 상해, 재산상의 피해를 사전에 방지하기 위해 안전에 관련된 중요한 사항들을 기재하고 있으니 반드시 지켜 주십시오.

*그림기호의 의미는 아래와 같습니다.



이 그림기호는 반드시 지켜야 할 강제사항을 의미합니다.



이 그림기호는 해서는 안되는 금지를 의미합니다.



경고 표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망 및 피해가 발생할 가능성이 있는 경우



주의 표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품손상 및 피해가 발생할 가능성이 있는 경우

경고



한번 사용한 채혈침은 반드시 채혈기에서 분리하여 폐기 하십시오.
채혈침을 재사용 할 경우 감염의 우려가 있습니다.



채혈기 헤드 등이 혈액에 의해 오염되었을 경우 반드시 소독 후 사용 하십시오.
오염된 제품 사용 시 감염의 우려가 있습니다.



사용 후 알콜 등으로 채혈기를 소독하십시오.
오염된 제품 사용 시 감염의 우려가 있습니다.



사용목적 이외의 용도로 사용하지 마십시오. 감염 및 상해를 입을 수 있습니다.



유아나 지각장애가 있는 사람은 사용하지 마십시오. 감염 및 상해를 입을 수 있습니다.

주의




제품 본체를 분해하지 마십시오. 제품손상의 원인이 될 수 있습니다.



제품 본체는 중탕 소독하지 마십시오.
제품 내부의 변형 및 열화로 제품손상의 원인이 될 수 있습니다.

사용방법

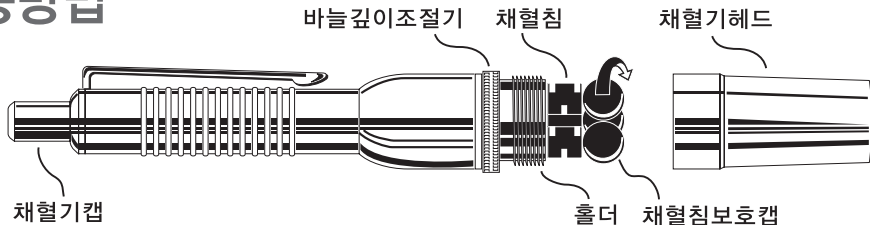

채혈침 3개를 홀더에 삽입하고
채혈침보호캡을 돌려서 탈피하면
채혈바늘이 나옵니다.

채혈기헤드를 홀더에
삽입하기 전에 바늘깊이조절기를
돌려서 바늘깊이를 조절 할 수
있습니다.(시계방향 +)

채혈기헤드를 돌려서
완전히 잠그고 채혈기캡을
돌려서 작동합니다.
채혈침 3개가 동시에 사혈
됩니다.

*채혈침은 별매품

사용목적

인체에서 적은 양을
채혈하는 데에 사용하는 기구

제품표시

제품명 : 채혈기
형명 : BCI-103
품목신고번호 : 경인 제선 07-227호
포장단위 : EA

* 본 제품은 의료기기입니다.

제품규격

Ø 19mm×137.2mm
Net Weight : 62g


보관방법

통풍이 잘되는 건조한 곳에 보관

교환, 반품 및 A/S

- 당사 제품의 소비자분쟁해결기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거합니다.
- 당사 제품의 보증기간은 1년입니다.

| 소비자 피해유형 | 보상 내용 | |
|---|--------------|---------|
| | 보증기간 이내 | 보증기간 이후 |
| 구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장으로 중요한 수리를 요하는 경우 | 제품교환 또는 환불 | 해당 없음 |
| 구입 후 30일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장으로 중요한 수리를 요하는 경우 | 제품교환 또는 무상수리 | 해당 없음 |
| 천재지변에 의한 고장이 발생 하였을 경우 | 유료수리 | 유료수리 |
| 사용상 정상마모 되는 소모성 부품을 교환하는 경우 | | |
| 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부원인으로 인한 경우 | | |

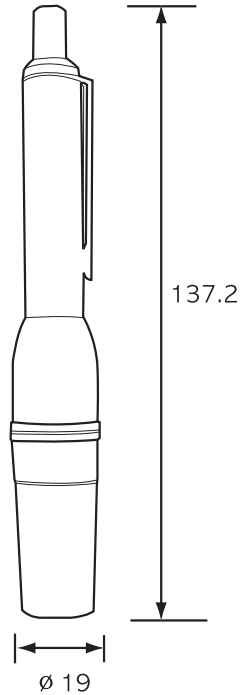

제품보증서

제품명 : _____ 모델명 : _____
구입일 : _____ 년 _____ 월 _____ 일
고객명 : _____ 전화번호 : _____
판매점 : _____ 전화번호 : _____

- 수리 의뢰시 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 규정된 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상보증기간은 구입일로부터 산정되므로 판매점 등에서 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. 구입일자 미기재 및 확인이 곤란한 경우 제조년월일로부터 3개월이 경과한 날을 기준으로 품질 보증기간을 기산합니다.
- 당사 부품 보유기간은 6년입니다.

ame

(주)에이엠이 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 469 (우)17600
고객상담실 031-677-7522

사용설명서

BCI-104

이 사용설명서를 반드시 읽은 후 사용하시고,
다 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

안전을 위한 주의사항

반드시 지켜 주십시오!

사용자 및 그 외의 사람에게 상해, 재산상의 피해를 사전에 방지하기 위해 안전에 관련된 중요한 사항들을 기재하고 있으니 반드시 지켜 주십시오.

*그림기호의 의미는 아래와 같습니다.



이 그림기호는 반드시 지켜야 할 강제사항을 의미합니다.



경고

표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망 및 피해가 발생할 가능성이 있는 경우



이 그림기호는 해서는 안되는 금지를 의미합니다.



주의

표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품손상 및 피해가 발생할 가능성이 있는 경우

경고



한번 사용한 채혈침은 반드시 채혈기에서 분리하여 폐기 하십시오.

채혈침을 재사용 할 경우 감염의 우려가 있습니다.



채혈기 헤드 등이 혈액에 의해 오염되었을 경우 반드시 소독 후 사용 하십시오.

오염된 제품 사용 시 감염의 우려가 있습니다.



사용 후 알콜 등으로 채혈기를 소독하십시오.

오염된 제품 사용 시 감염의 우려가 있습니다.



사용목적 이외의 용도로 사용하지 마십시오. 감염 및 상해를 입을 수 있습니다.



유아나 지각장애가 있는 사람은 사용하지 마십시오. 감염 및 상해를 입을 수 있습니다.

주의




제품 본체를 분해하지 마십시오.

제품손상의 원인이 될 수 있습니다.




제품 본체는 중탕 소독하지 마십시오.

제품 내부의 변형 및 열화로 제품손상의 원인이 될 수 있습니다.

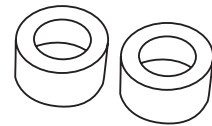

채혈기헤드커버 2EA
채혈깊이의 감소를 위해 장착사용.
실리콘 재질, 중탕소독 가능

사용방법

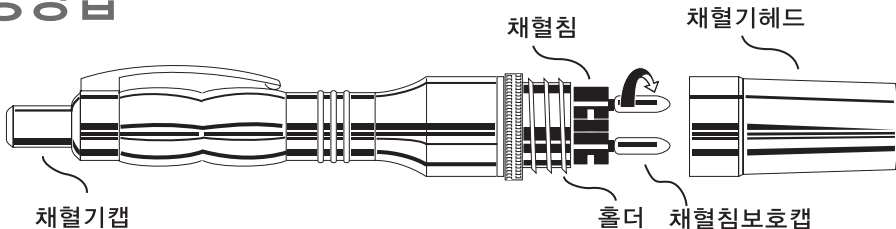

채혈침 4개를 홀더에 삽입하고 채혈침보호캡을 돌려서 탈피하면 채혈바늘이 나옵니다.

채혈기헤드를 돌려서 완전히 잠고 채혈기캡을 돌려서 작동합니다. 채혈침 4개가 동시에 사혈됩니다.

*채혈침은 별매품

사용목적

인체에서 적은 양을
채혈하는 데에 사용하는 기구

제품표시

제품명 : 채혈기
형명 : BCI-104
품목신고번호 : 경인 제선 07-225호
포장단위 : SET

* 본 제품은 의료기기입니다.

제품규격

Ø 20mm×137.2mm
Net Weight : 30g


보관방법

통풍이 잘되는 건조한 곳에 보관

교환, 반품 및 A/S

- 당사 제품의 소비자분쟁해결기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거합니다.
- 당사 제품의 보증기간은 1년입니다.

| 소비자 피해유형 | 보상 내용 | |
|---|--------------|---------|
| | 보증기간 이내 | 보증기간 이후 |
| 구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장으로 중요한 수리를 요하는 경우 | 제품교환 또는 환불 | 해당 없음 |
| 구입 후 30일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장으로 중요한 수리를 요하는 경우 | 제품교환 또는 무상수리 | 해당 없음 |
| 천재지변에 의한 고장이 발생 하였을 경우 | 유료수리 | 유료수리 |
| 사용상 정상마모 되는 소모성 부품을 교환하는 경우 | | |
| 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부원인으로 인한 경우 | | |

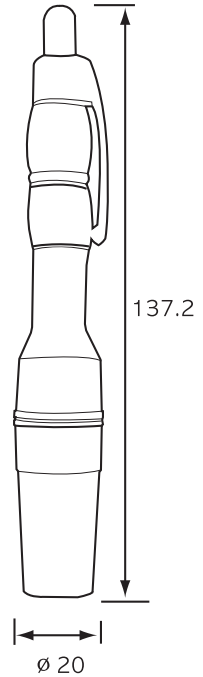

제품보증서

제품명 : _____ 모델명 : _____

구입일 : _____ 년 _____ 월 _____ 일

고객명 : _____ 전화번호 : _____

판매점 : _____ 전화번호 : _____

- 수리 의뢰시 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 규정된 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상보증기간은 구입일로부터 산정되므로 판매점 등에서 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. 구입일자 미기재 및 확인이 곤란한 경우 제조년월일로부터 3개월이 경과한 날을 기준으로 품질 보증기간을 기산합니다.
- 당사 부품 보유기간은 6년입니다.

ame

(주)에이엠이 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 469 (우)17600
고객상담실 031-677-7522